

B Medical Systems RCW 25-PCM-30°C Con elementi PCM -30°C

Robusto supporto per vaccini per il trasporto e la conservazione sicuri dei vaccini
 Secondo ADR e RID (2008/68 / EC), IMDG (2002/84 / EC) e ICAO-TI / IATA-DGR

Raffreddamento: sistema di trasporto passivo con elementi di raffreddamento PCM

Capacità di stoccaggio del vaccino: 20,0 litri

Temperatura/Tempo di pre-condizionamento:

cella frigorifera: $\leq -40^\circ\text{C}$ / > 72 ore

Accumulo di calore: $\geq 25^\circ\text{C}$ / > 72 ore


Temperatura di conservazione: da -35°C a -15°C

Chiudibile a chiave, sigillabile e impilabile



I PCM Pack sono elementi di accumulo di calore, contenenti un cosiddetto materiale a cambiamento di fase (PCM). Il PCM immagazzina il calore latente alla temperatura richiesta al cambio di fase (liquido / solido). Il prodotto immagazzinato rimarrà quindi a una temperatura quasi costante per un determinato periodo di tempo, senza richiedere un controllo attivo della temperatura.

Numero di Elementi PCM	Volume di carico	PCM tipo	PCM Colore	Mantenimento con + 43°C di temperatura ambiente	Mantenimento con + 20°C di temperatura ambiente
14	20 L	-30°C	Arancio	26,5 h (sotto -20°C)	50 h (sotto -20°C)
18				40,2 h (sotto -20°C)	67 h (sotto -20°C)
24				57,8 h (sotto -20°C)	92,5 h (sotto -20°C)

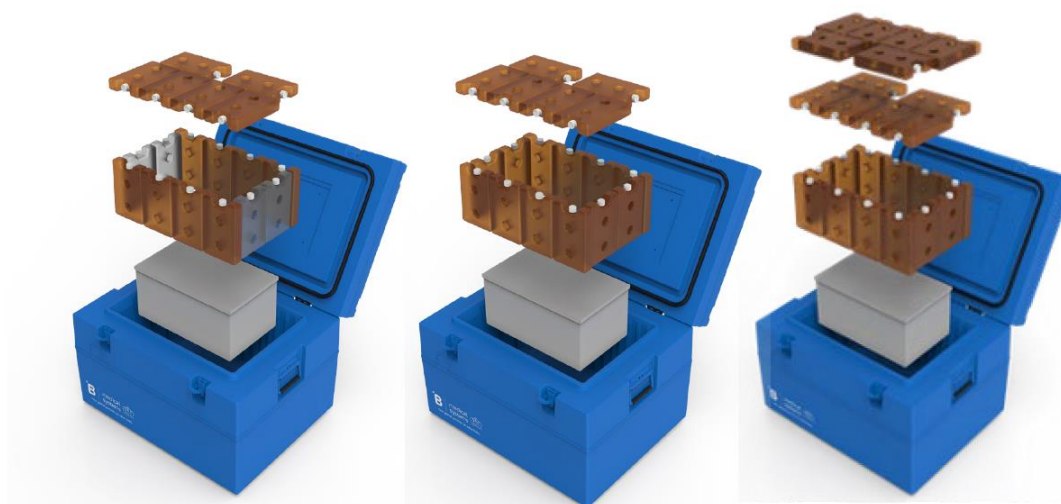

Informazioni di carico:	14 PCM	18 PCM	24 PCM
-------------------------	--------	--------	--------

Dati tecnici

Volume lordo: 44 litri Dimensioni interne: 264 x 496 x 334 mm (A x L x P)

Peso netto: 15,9 kg Dimensioni esterne: 499 x 710 x 550 mm (A x L x P)

Peso lordo: 38,9 kg

Materiale esterno: Polietilene Isolamento: Poliuretano

Materiale interno: polietilene Spessore isolamento: 90-105 mm

Documentazione disponibile per B Medical Systems RCW 25:

Dichiarazione di conformità (in conformità con ADR e RID, IMDG e ICAO-TI / IATA-DGR)

- Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID), Direttiva 2008/68 / CE
- Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose tramite trasporto marittimo (IMDG), Direttiva 2002/84 / CE
- Accordo internazionale per il trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

"RCW 25 è stato approvato per merci del gruppo di imballaggio II e III."

